

“RELAX”

- REINIGUNGSGERÄT MIT ROTIERENDER TROMMEL-

Die Zeit, die zur Reinigung der Zahnabdrucklöffel im Labor beschäftigt wird, wird heute dank des neuen „Relax“ auch für andere Arbeiten beschäftigt.

Das Reinigungsgerät mit rotierender Trommel nimmt mit einem kalten Wasserstrahl die Alginat von den Zahnabdrucklöffeln weg und macht sie wie neu. Praktisch, schnell und benutzerfreundlich: Ein Gerät, das erlaubt, Zeit und Geld zu sparen, und das den Kunden saubere und wiederverwendbare Zahnabdrucklöffel liefert. Dank der Druckregler kann man auch Produkte aus technischen Kunststoffen waschen.

Bedienfeld

- START-Taste
- STOP-Taste
- 3 LED-Leuchten
- 3 helle Farben für jede LED
- Die Kombination der Farben und ihrer Position zeigt intuitiv den Betriebszustand oder eine Störung des Gerätes an.

Reinigungsgerät von Zahnabdrucklöffeln

- Einfach zu benutzen: die Zahnabdrucklöffel in die rotierende Trommel einfügen und die START-Taste drücken.
- Eine elektronische Karte verwaltet die Dienste des Gerätes und signalisiert durch LED-Leuchten potenzielle Probleme.
- Professionell: für kleine Büros.

Druckregler

Der Benutzer kann den Betriebsdruck von 10 bis 100 bar regulieren.

Ladefähigkeit der Trommel

Der Benutzer kann 8/10 Zahnabdrucklöffel in die Trommel einfügen, um sie zu waschen



Abfallsammelkorb

- Das Gerät lässt das Abwasser seitlich in dem Waschbecken der Werkbank aus.
- Um die Verstopfung der Abflüsse und Verschmutzung zu vermeiden, ist das Gerät mit einem Netzkorb ausgestattet, der die Alginat von den Zahnabdrucklöffel enthält.

Anzeige und Alarme

Das Gerät signalisiert durch LED-Leuchten:

- Gerät betriebsbereit
- Einzelzyklus
- Doppelzyklus
- Dreifachzyklus
- Nicht geschlossener Deckel
- 30 Stunden Alarm vor der Unterstützung
- Alarm für Kundendienst rufen
- Arbeitsstunden.